

LADY-COMP®

BABY-COMP®

Instrukcja



..... Inteligentne komputery cyklu kobiety



Chcielibyśmy pogratulować Tobie dokonania decyzji o naturalnym planowaniu rodziny.

Jeśli zakupiłaś Lady-Comp lub Baby-Comp, a jednocześnie szukasz wiarygodnej metody planowania rodziny – dokonałaś dobrego wyboru. Dziesiątki tysięcy kobiet już podjęło tę decyzję przed Tobą. I wszystkie te kobiety są zadowolone z tej naturalnej i bezpiecznej metody.

Prosimy o uważne i dokładne przeczytanie instrukcji dla Twojego bezpieczeństwa. Wszystko, co powinnaś wiedzieć o urządzeniu znajduje się w tej instrukcji.

Życzymy dobrego startu.

Lady-Comp / Baby-Comp

Podłączanie Lady-Comp/Baby-Comp 6

Podłączenia
Ładowanie baterii

Najpierw sprawy najważniejsze 7

Podstawy 8

Samotestowanie oraz włączanie i wyłączenie 9

Lady-Comp pozycje operacyjne..... 10

Przyciski funkcjonalne..... 11

Wyświetlacz Lady-Comp 12

Niezbędne ustawienia przed startem 13

Pomiar temperatury 16

Limit czasowy na dokonanie pomiaru temperatury
Zakłócenia w czasie pomiaru
Opuszczanie pomiaru temperatury
Gorączka

Dane o miesiączce „M” 18

Aktywacja „M”
Korekta „M”
Wprowadzanie „M” w późniejszym czasie

Wskazywanie płodności..... 20

Urządzenie uczy się Twojego cyklu
Wskazywanie ciąży
Wskazywanie płodności
Wsteczne wskazywanie płodności

Statystyka cyklu Lady-Comp..... 22

Cykle monofazowe
Zapytanie o statystykę cyklu
Analiza danych i wydruk

Ustawienia 24

Ustawianie czasu

Ustawianie daty

Ustawianie tonu alarmu

włączanie i wyłączanie alarmu

Inne informacje 26

Powrót do urządzenia po przerwie

Podróżowanie/zmiana strefy czasowej

Praca w systemie zmianowym

Czas letni i zimowy

Po tabletkach

Brak pomiaru temperatury

Czyszczenie urządzenia

Indeks Pearl

Wydruk danych

Dane techniczne 28

Usuwanie przechowywanych danych

Regulacja jasności

Źródło zasilania

Nie ma ryzyka utracenia danych

Bateria

Dodatkowe funkcje Baby-Comp**Baby-Comp pozycje operacyjne** 30**Baby-Comp wyświetlacz** 31**Pozycja planowania** 32

Planowanie ciąży

Prognoza płci

Wprowadzanie danych o współżyciu

Data poczęcia i porodu

Ciąża 34

Wskazywanie ciąży

Potwierdzanie ciąży

Powrót do urządzenia po ciąży

Statystyka cyklu i planowania 36

Analiza danych, wydruk i serwis

Indeks alfabetyczny 38